


COVID-19 Antigen Speichelabstrich Schnelltest Kit (Colloidal Gold)

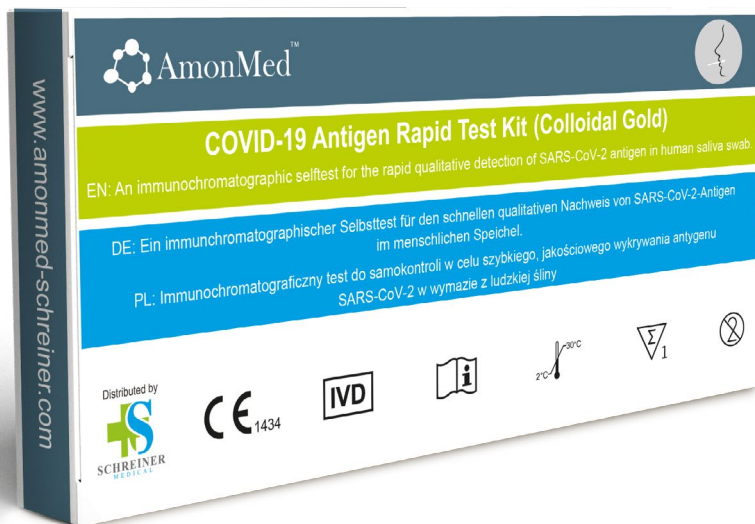


- ➔ **Sicherheit**
durch höchste Qualitätsstandards
- ➔ **Genauigkeit**
durch führende technologische Stärke
- ➔ **Vertrauen**
durch langjährige Erfahrung

Erhältlich in den Packungsgrößen: 1 Testkit, 5 Testkits und 25 Testkits.

Wirkungsweise

Das COVID-19 Antigen Speichelabstrich Schnelltest Kit weist anhand immunochromatographischer Technologie das neuartige Coronavirus im menschlichen Speichel nach. Bei positivem Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen im Speichel erscheint eine farbige Testlinie (T) im Ergebnisfenster. Im Falle eines negativen Ergebnisses erscheint keine Testlinie (T).

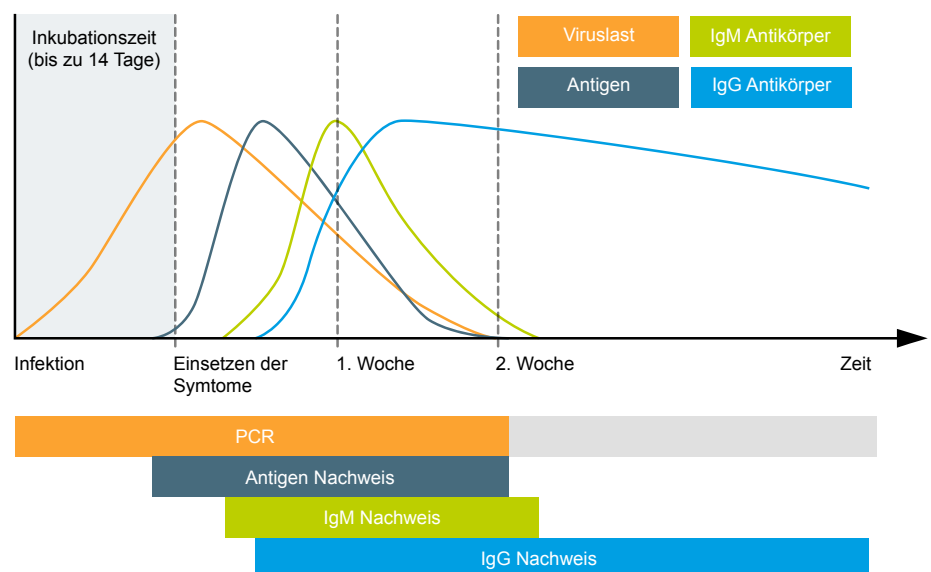


HAFTUNGAUSSCHLUSS: Die Grafik dient nur zu Informationszwecken. Die Nachweisfenster können von Person zu Person variieren.


Anwendung



1. Befüllen des Extraktionsröhrchens mit der Extraktionslösung.

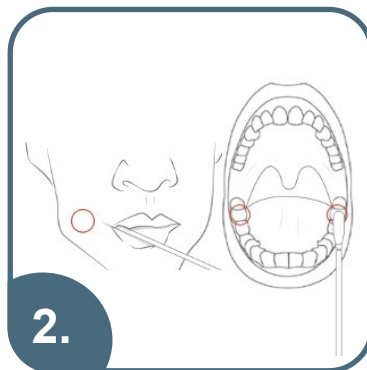


2. Entnahme des **Speichelabstrichs** mit Tupfer.

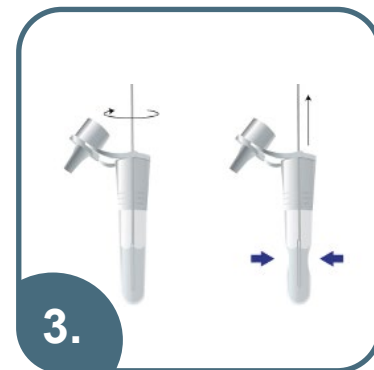


3. **Eintauchen des Speichelabstrichs** in Extraktionslösung. Mindestens 5 mal rühren und eine Minute in der Lösung lassen. Bei Entnahme des Tupfers das Röhrchen zusammenpressen und Flüssigkeit aus dem Tupfer drücken.



4. **Schließen der Kappe** des Extraktionsröhrchens.

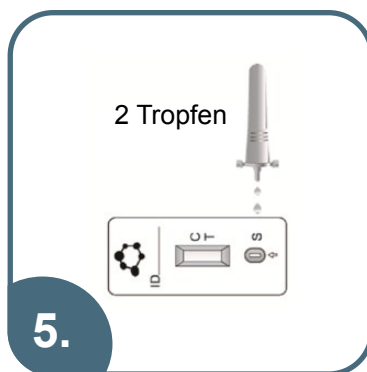


5. **Eingabe** von 2 Tropfen der Probe in Probenvertiefung der **Testkarte**.

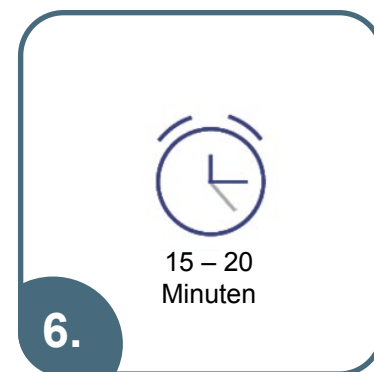


6. Ablesen des **Testergebnisses** nach 15 – 20 Minuten.

Auswertung des Ergebnisses


negativ

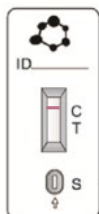

positiv

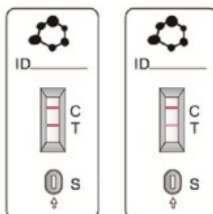

ungültig

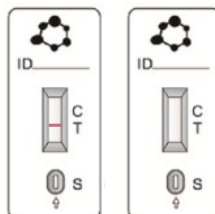

Sensitivität: 96.55% (95% CI, 93.05% ~98.32%)
Sensitivität: Die echte Positivquote
Spezifität: >99.00% (95% CI, 99.19% ~100.00%)
Spezifität: Die echte Negativquote
Genauigkeit: 98.86% (95% CI, 97.87% ~99.50%)
Genauigkeit: Die tatsächliche Negativ- und Positivquote
Nachweisgrenze: 5×10^2 TCID₅₀/mL

Produkt	Packungsinhalt	Packungsgrößen	Probenart	Haltbarkeitsdauer
COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	Speicheltupfer Extraktionsröhrchen Extraktionslösung Testkarte Gebrauchsanleitung	1 Test /Kit 5 Tests / Kit 25 Tests / Kit	Speichel- abstrich	18 Monate

MatchPHARM

Vertrieb durch: Matchpharm GmbH
 Birkenstr. 2a, 82041 Deisenhofen
 Tel.: +49 (0) 89 2093 0215
 Email: order@matchpharm.de